

- Produktdatenblatt -

■ Augenspülflasche PLUM 4752 200 ml sterile Phosphatpufferlösung 4,9 %

ArtNr: 3043-102

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Plum pH Neutral ist eine 4,9 % Phosphat gepufferte Augenspüllösung, die schnell Säuren und Alkali neutralisiert.

- Produkteigenschaften:

- 4,9% steriler Phosphatpuffer zur Neutralisierung von Säuren und alkalischen Substanzen im Auge
- Nach dem Einsatz von pH Neutral wird die Fortsetzung der Spülung mit der Plum Augenspülung (0,9 % Natriumchloridlösung) auf dem Weg zum Arzt empfohlen
- Benutzerfreundliche Flaschen
- Ergonomische Augenmuscheln für effektiven Durchfluss
- Der spezielle DUO-Augenaufsatz sichert die gleichzeitige Spülung beider Augen
- Das praktische Design ermöglicht das schnelle Öffnen der Flaschen mit nur einer Hand
- Einwegflaschen; nicht wiederverwenden
- CE-gekennzeichnete Produkte mit 3,5-jährigem Verfallsdatum

- Anwendung:

Durch die Verwendung des 4,9 % Phosphatpuffers wird der pH-Wert der Chemikalie schnell auf ein unbedenkliches Niveau neutralisiert.

Eine schnelle Neutralisierung ist entscheidend, um die Auswirkungen eines Unfalls mit Säuren und Laugen zu minimieren.

Die Spülung des Auges mit normalem Wasser oder 0,9 %iger Kochsalzlösung hat lediglich einen Verdünnungs- und Spüleffekt (siehe Abbildung 1).

Nach der Verwendung von pH Neutral wird empfohlen das Auge mit Plum Eyewash 0,9% Natriumchlorid weiter zu spülen, bis Sie einen Arzt oder die Notaufnahme erreichen.